

**INSTRUÇÕES DE USO**
**IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

**Nome Técnico:** Nebulizador

**Nome Comercial:** Sistema para aerosolterapia Hydrox

**Modelo:** HA-CA-001 - Adaptador para umidificação, HA-45-000 - Frasco Nebulizador preenchido com 450 ml de água estéril com adaptador para nebulização, NA-CA-001 - Adaptador para nebulização, NA-45-000 - Frasco Nebulizador preenchido com 450 ml de água estéril, NA-65-000 - Frasco Nebulizador preenchido com 650 ml de água estéril.

**Nº do Cadastro na ANVISA:** 81312909001

**Reprocessamento Proibido.**

**Prazo de Validade:** 5 anos

**Embalagem:** O produto é de Uso Único, contendo água estéril e purificada, sendo disponibilizado ao consumidor conforme mostrado na tabela abaixo:

Modelo	Imagem
HA-45-000 - Frasco Nebulizador preenchido com 450 ml de água estéril com adaptador para nebulização	
NA-45-000 - Frasco Nebulizador preenchido com 450 ml de água estéril  NA-65-000 - Frasco Nebulizador preenchido com 650 ml de água estéril  A diferença entre eles é apenas na quantidade de líquido dentro do frasco	
NA-CA-001 - Adaptador para nebulização	

HA-CA-001 - Adaptador para umidificação



### INDICAÇÃO DE USO / FINALIDADE

O Sistema para aerossolterapia Hydrox é um sistema de nebulização que tem a finalidade de umidificar os gases respiráveis canalizados para o paciente durante terapias respiratórias, através da adição de água estéril em forma de névoa. Ao ser conectada no fluxo de gases através do adaptador, a água estéril e purificada dentro do frasco umidifica o gás respirado.

### MODO DE USO

HA-CA-001 - Adaptador para umidificação – conexão com o frasco nebulizador de 450 mL ou 650 mL:

1 - Torcer o plugue no coletor do adaptador;



2 - Aparafusar o adaptador no conector do adaptador;



3 – Conectar o adaptador no medidor de vazão;



4 - Torcer o plugue no tubo conector;



5 - Conectar a tubulação no conector do tubo;



6 - Fechar o conector do tubo quando não estiver em uso.



**NA-CA-001 - Adaptador para nebulização – conexão com o frasco nebulizador de 450 mL ou 650 mL:**

1 - Torcer o plugue no coletor do adaptador;



2 - Aparafusar o adaptador no conector do adaptador no sentido horário;



3 – Torcer o plugue na ponta da mangueira;



4 – Conectar a tubulação do adaptador do nebulizador na ponta da mangueira



5 – Conectar o nebulizador no medidor de vazão;



6 – Conectar o buraco da tubulação na saída do aerossol;



7 – Ajustar a concentração de oxigênio desejada (FiO2).



**OBS:** Para os modelos comerciais NA-45-000 - Frasco Nebulizador preenchido com 450 ml de água estéril e NA-65-000 - Frasco Nebulizador preenchido com 650 ml de água estéril, seguir um dos passos descritos acima de acordo com o adaptador que for escolhido para usar em conjunto com o frasco.

### CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar à temperatura ambiente (15º a 30º C), em local seco, arejado e ao abrigo da luz natural.

### CONDIÇÕES DE TRANSPORTE

Transportar em condições que protejam o produto de sofrer danos, à temperatura ambiente (15º a 30º C), em local seco, arejado e ao abrigo da luz natural.

### CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO

Devem ser manipulados por profissionais qualificados, em local higienizado, com a utilização de luvas para proteção individual.

Produto danificado deve ser considerado como impróprio para o uso. O descarte do produto usado ou danificado deve ser feito de acordo com as orientações do fabricante em local adequado conforme legislações vigentes.

### ADVERTÊNCIAS

- Produto para uso em um único paciente. Não pode ser compartilhado. Reprocessamento proibido.
- A água estéril do frasco do Hydrox é de uso exclusivo para o auxílio da formação de névoa para fins terapêuticos inalatórios. Não pode ser usada para administração parenteral, intravenosa, solvente ou diluente de medicamento.
- O fabricante do produto não será responsável por quaisquer danos diretos ou indiretos resultantes do não cumprimento das instruções fornecidas com o produto, uso incorreto, manuseio ou preparação imprópria.

### PRECAUÇÕES

- Siga corretamente as Instruções de Uso.
- O conteúdo é considerado estéril desde que o reservatório não esteja danificado.
- A superfície externa do frasco reservatório não é estéril.
- Não contém agentes antimicrobianos.

**IMPORTADOR/DISTRIBUIDOR**

**DISPROCOR BRASIL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA**

CNPJ: 23.209.115/0001-96 - Autorização: 8.13.129-0

Responsável Técnico: Murieni Correia Rocha / CRF-RJ:27272

SAC: +55 21 35969880

**FABRICANTE**

UWHM SDN. BHD – MALÁSIA

---

**Responsável Legal**

Flávio Moreira de Avellar

---

**Responsável Técnico**

Murieni RochaCorreia

CRF-RJ:27272

**HISTÓRICO**

<b>Data</b>	<b>Alteração</b>	<b>Responsável</b>
09/2021	REV.00 Criação do documento	Murieni R.C. de Paula
11/2022	REV.01 Inclusão de modelo comercial	Murieni R.C. de Paula
02/2023	REV. 02 – Adequação de imagens do Hydrox nos documentos	Murieni R.C. de Paula
03/2023	REV.03 – Adequação de texto	Murieni R.C. de Paula